

VISIOTEST K2

SCREENING SEHTESTGERÄT FÜR DIE ARBEITSMEDIZIN
Robust • leicht • Für Sehtests in G25, G26, G37 etc • LED Beleuchtung



Essilor Visiotest



Simpel, robust, schnell

Ein Sehtestgerät hoher Leistungsfähigkeit für viele Einsatzbereiche. Mit seinem modernen Design, der einfachen Bedienung, sowie seiner sofortigen Einsatzfähigkeit eignet sich der VISIOTEST für den mobilen sowie für den stationären Einsatz.

Das Sehtestgerät VISIOTEST bietet Testdarstellungen, wahlweise Landoltringe oder Buchstaben, in Prüfungs-entfernungen von 5 m und im Nahbereich von 33 cm an. Durch die Verwendung des Visiokit-Aufsatzes erfolgt die Darstellung der Optotypen in mittlerer Entfernung bei 55 cm.

Ob Sie nun Screeningtests im Rahmen der Verkehrssicherheit, zur Früherkennung von Sehschwächen oder eine Prüfung der Sehschärfe im Rahmen der Berufsgenossenschaftlichen Untersuchungsreihen G37 und G25 durchführen, VISIOTEST ist immer eine gute Wahl.

Artikel-Nummer: C77305-KIT55
Zusatzgerät für Essilor Visiotest : Campitest

Visiotest™ Kontrolltabelle

1 & 2 - Prüfung Sehschärfe monokular

Bitte schauen Sie sich die Ringe an und sagen Sie, auf welchem Strahl sich die Öffnung in den Ringen befindet. Bitte beginnen Sie mit der Zeile 12, sollten Sie diese nicht erkennen können, dann bitte mit Zeile 10 fortfahren u.ä.m.

3 - Prüfung Sehschärfe binokular

Bitte schauen Sie sich die Ringe an und sagen Sie, auf welchem Strahl sich die Öffnung in den Ringen befindet. Bitte beginnen Sie mit der Zeile 12, sollten Sie diese nicht erkennen können, dann bitte mit Zeile 10 fortfahren u.ä.m.

1 = Rechtes Auge		2 = Linkes Auge	
2	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
3	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
4	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
5	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
6	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
7	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
8	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
9	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
10	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
11	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖
12	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖	⊗ ⊙ ⊕ ⊖

3 - Prüfung Stereoskopie

Bitte schauen Sie sich die Ringe an und sagen Sie, ob sich die Buchstaben vor oder hinter dem Gitter befinden. Beginnen Sie bitte von links.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4 - Rot-Grün Test

Rechtes Auge: R G G G
Linkes Auge: R G G G

5 - Phorie-Test

1 A B C D E F G H I J K L M N O
2
3

6 - Farbsinn-Prüfung nach Ishihara

Farbsichtig: 10 44 88
Farbschwach: 10 44 88

Die Tests und die Auswertung



Optional: Koffer, Perimeter

Die Optionen

- Perimetrieaufsatz „Campitest“, Art.Nr.: C78000
- Tragekoffer Art.Nr.: C77200

Die technischen Daten des Visiotest

- Beleuchtung des Sehtestbereichs : 320 cd/m²
- Kontrast der Optotypen nahe bei 1
- Höhenverstellbares Gerät (einstufig)
- Gewicht : 4,9 kg
- Masse : Tiefe 30 cm, Länge 24,5 cm, Höhe 37 cm
- Stromversorgung : 230 V – 50 Hz
- Lampe : LED - neu!
- Sicherungen : 250 V 2 x 0,4A
- Stromverbrauch : 10 W
- Normenmäßigkeit : CEI 601-1 / VDE 0871 / 93/42/CEE
- Die Geräte entsprechen den CE-Richtlinien. Technische Änderungen sind vorbehalten.